

Funktionen während eines XpertEye Videoanrufs

Video Schnittstelle



Kontaktliste öffnen

Einen Anruf auflegen

Mikrofon und Kamera wählen und aktivieren/deaktivieren

Vollbild

Verschiedene Funktionen:

- Anmerkungen machen
- LED-Leuchte Aktivieren/Deaktivieren
- Geben Sie Ihren Bildschirm für die Teilnehmer frei
- Verwenden Sie den Pointer, um Elemente hervorzuheben, auf die Sie sich konzentrieren möchten

Vergrößern oder Verkleinern des gemeinsam genutzten Bereichs.
Im Board: bearbeiten und teilen von Bildern
Machen Sie ein Foto und öffnen Sie das Board

Funktionen während eines XpertEye Videoanrufs

Board Schnittstelle

Zurück zum aktuellen Videoanruf

Das aktuelle Bild speichern
Ein Foto von dem ausgewählten Video-Feed machen
Das Fotos Timeline ein- und ausblenden

Videovorschau anzeigen oder ausblenden

Ein Menu öffnen:
- Die Synchronisation des Boards einstellen (Öffnen/Schließen)

Ein White Board erstellen

Eine Bilddatei Importieren :
jpeg, jpg, png, pdf, zip, oder ein bestehendes XpertEye Board (.xpe)

Markieren Sie ein Element mit dem Pointer

Sich innerhalb des Boards bewegen

Freihand zeichnen

Wählen Sie die Farbe der Grafik oder des Textes

Löschen der ausgewählten Anmerkung oder des ausgewählten Textes

Drehen (90°) von Medienobjekten im Board

Einstellen der Zoomstufe

Auswählen und Verschieben einer oder mehrerer Anmerkungen

Ein Pfeil erzeugen

Text einfügen (auf 32 Zeichen begrenzt)

Alle Anmerkungen oder Text im Board löschen

Markieren Sie einen Bereich mit einer gepunkteten Linie

Zurück zum anfänglichen Zoom

Bild an die Datenbrille senden